


# Instruktioner

## Klamydia

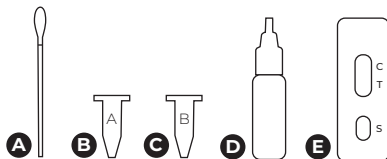

1) Ta ut topsen (A) och för in den 1-1,5 cm i urinröret/vaginan. Roterä topsen upprepade gånger. Låt den vara kvar i 5-10 sekunder.

2) Häll innehållet från den lilla blå behållaren märkt med "CT Diluent A" (B) i den stora behållaren "Sample Tube" (D).

3) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 2 minuter innan du tar bort den.

4) Häll innehållet från den lilla blå behållaren märkt med "CT Diluent B" (C) i den stora behållaren "Sample Tube".

5) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" igen och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 1 minut innan du tar bort den och sätter på locket på "Sample Tube".

6) Ta fram kassetten (E) och droppa 3 droppar från "Sample Tube" i det runda hålet märkt "S" på kassetten. Vänta och läs av resultatet efter 15 minuter.



Possitivt



Negativt



Ogiltigt